

# ミラクルグリップ®

## 取扱説明書

この度はミラクルグリップをお買求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

### ご使用方法

- Step1. 手指の拘縮が酷い方は①のように装着してください。  
Step2. グリップが入るようであれば②のように装着してください。  
Step3. リングに指を通せない場合は③のように切り除いても結構です。  
Step4. 指と指の間にリングとフィンを通して握ってください。  
Step5. 手指がある程度開いている方はより太いミラクルグリップ60をご活用ください。  
(↑は脇の下・両膝の間にも使用いただけます)



### お手入れ方法

- ・洗濯機での丸洗い可能です。




### 注意事項

- ・装着の際、骨折や怪我のないよう十分にご注意ください。
- ・拘縮が酷い場合、又は皮膚が薄く指通しをして擦れてしまう場合は、リングやフィンをハサミで切り除いてご利用ください。
- ・アレルギーの原因となる素材は使用しておりませんが、万一症状が出た場合又は、その他ご使用により出血や皮膚の擦れ、褥瘡等、異常が見られた場合にはご使用を中止して、医師の診察を受けてください。
- ・ごく稀に内部のクッション繊維がカバーより出る場合がございます。  
万一繊維が出ている場合はハサミで切り、カバーを摘み上げていただければ繊維はでなくなります。
- ・日陰干しにして、乾燥機は使用しないでください。


### 仕様

カバー材: ポリエステル 100%  
芯材: ポリエチレン 100%  
抗菌消臭剤: リン酸チタニア系無光触媒(防菌及び消臭効果)

### 商品部分名称

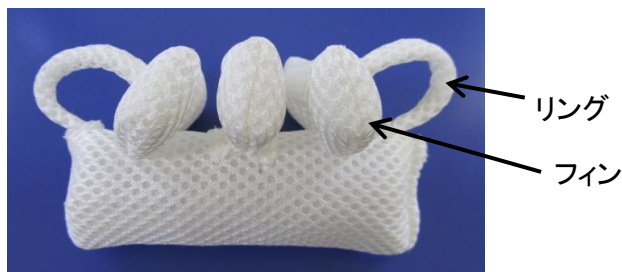

### お問い合わせ

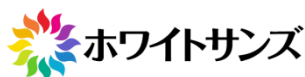

株式会社ホワイトサンズ  
〒467-0043  
名古屋市瑞穂区岳見町5-18-1  
TEL: 052-838-6203  
FAX: 052-838-6204  
URL: <http://whitesuns.com>