

ミラクルグリップ® 40T


取扱説明書

この度はミラクルグリップをお買求めいただきまして、誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

ご使用方法

- Step1. 手指の拘縮が酷い方は①のように装着します。
Step2. マジックテープを開き、②のようにベルトとの間に指を入れます。
Step3. 本品が手から落ちないように、③のようにマジックテープで調整して閉じます。
Step4. 手指がある程度(4cm以上)開いている方は本品を2本握り、
グリップの反発が手指に伝わるよう④のようにお使いください。

片麻痺の方には・・・不自由な手には常時本品を装着し、自由に使える手にも時々本品を持ち握る緩めるの運動をして下さい。また、麻痺している手が握る緩める運動が出来るよう⑤のように自由に使える手で手伝って動かして下さい。

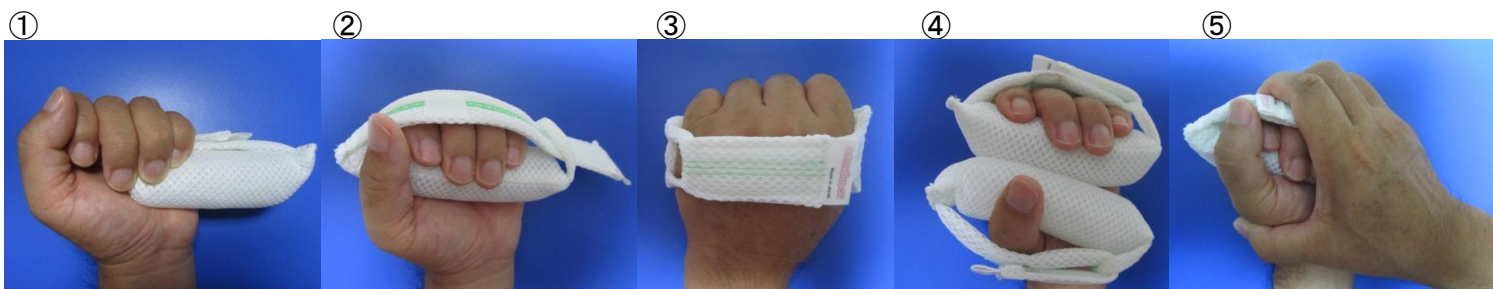

お手入れ方法

- ・洗濯機での丸洗い可能です。




注意事項

- ・装着の際、骨折や怪我のないよう十分にご注意ください。
- ・アレルギーの原因となる素材は使用しておりませんが、万一症状が出た場合又は、その他ご使用により出血や皮膚の擦れ、褥瘡等、異常が見られた場合にはご使用を中止して、医師の診察を受けてください。
- ・ごく稀に内部のクッション繊維がカバーより出る場合がございます。
万一繊維が出ている場合はハサミで切り、カバーを摘み上げていただければ繊維は出なくなります。
- ・日陰干しにして、乾燥機は使用しないでください。

仕様

カバー材 : ポリエステル 100%
芯材 : ポリエチレン 100%
抗菌消臭剤 : リン酸チタニア系無光触媒(防菌及び消臭効果)

商品部分名称

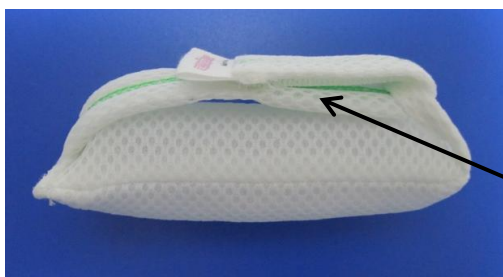

ベルト

お問い合わせ



株式会社ホワイトサンズ
〒467-0043
名古屋市瑞穂区岳見町5-18-1
TEL: 052-838-6203
FAX: 052-838-6204
URL: <http://whitesuns.com>