

# ミラクルグリップ® 200

## 取扱説明書

この度はミラクルグリップ200をお買求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

### — ご使用方法



サイズ: 170×170×50mm

拘縮した脚の膝等に挟みます



胸の上に置きます



拘縮した脇等に挟みます



### — お手入れ方法

- ・洗濯機での丸洗い可能です。



#### 注意事項

- ・装着の際、骨折や怪我のないよう十分にご注意ください。
- ・アレルギーの原因となる素材は使用しておりませんが、万一症状が出た場合又は、その他ご使用により出血や皮膚の擦れ、褥瘡等、異常が見られた場合にはご使用を中止して、医師の診察を受けてください。
- ・ごく稀に内部のクッション繊維がカバーより出る場合がございます。  
万一繊維が出ている場合はハサミで切り、カバーを摘み上げていただければ繊維はでなくなります。
- ・日陰干しにして、乾燥機は使用しないでください。

### — 仕様

カバー材 : ポリエステル 100%  
芯材 : ポリエチレン 100%

※商品のデザイン及び仕様等が予告なく変更となる場合があります

### — ミラクルグリップシリーズ

#### ミラクルグリップ40



直径: 40×120mm  
希望小売価格 ¥4,600  
(1組2個入り)

#### ミラクルグリップ60



直径: 60×150mm  
希望小売価格 ¥3,800

### — お問い合わせ



株式会社ホワイトサンズ  
〒467-0043  
名古屋市瑞穂区岳見町5-18-1  
TEL: 052-838-6203  
FAX: 052-838-6204  
URL: <http://whitesuns.com>

